

excilor®

WARZEN-STOPP 2 in 1

INHALT DIESER VERPACKUNG



Applikator



Beutel mit Vereisungsstiften



Gebrauchsanweisungen

SIE BENÖTIGEN



Papiertaschentücher



Zeitschaltuhr

2 PRODUKTE IN 1 APPLIKATOR

Produkt 1:
VEREISUNG




Schwammhalter

Vereisungsbehälter

Nur Tag 1

Produkt 2:
GEL-APPLIKATOR

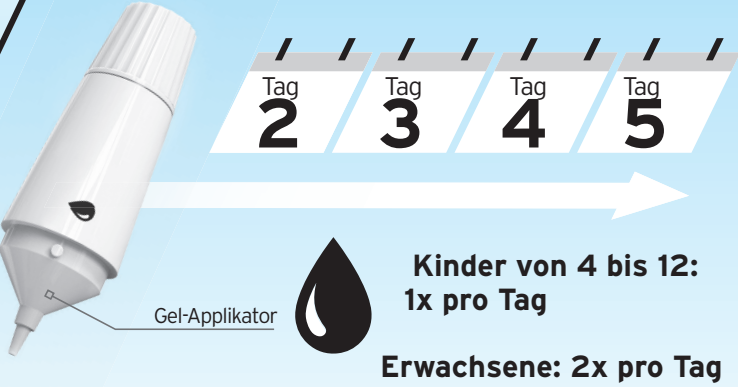

Gel-Applikator

Tag 2 Tag 3 Tag 4 Tag 5

Kinder von 4 bis 12:
1x pro Tag

Erwachsene: 2x pro Tag

VOR GEBRAUCH DIE GESAMTE GEBRAUCHSANWEISUNG LESEN

Wenn Sie Fragen haben, nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Arzt oder Apotheker auf.



excilor.com

Video-Anweisungen

WAS SIE WISSEN SOLLTEN, BEVOR SIE EXCILOR® 2 IN 1 WARZEN-STOPP ANWENDEN

Verwenden Sie Excilor® 2 in 1 Warzen-Stopp nicht

- Wenn sich die Warze nicht auf einer Hand oder einem Fuß befindet;
- Auf einer blutenden, gereizten oder entzündeten Haut oder einer Haut, die Entzündungssymptome aufweist wie Juckreiz oder Schwellung;
- Auf Stielwarzen, Muttermalen, dunklen Flecken, Wasserwarzen (Mollusca contagiosa), Alterswarzen (Verruca seborrhoica) oder einer abschuppenden Haut;
- Wenn Sie nicht sicher sind, ob es sich tatsächlich um eine Warze handelt;
- Wenn Sie überempfindlich gegen einen der Inhaltsstoffe sind.

! WARNHINWEISE UND VORSICHTSMAßNAHMEN

1. **NUR** für Warzen auf **Händen und Füßen**.
2. Vereisungsmittel weder einnehmen noch einatmen, nur in gut gelüfteten Räumen verwenden
3. Nur in Kombination mit den mitgelieferten Stiften verwenden.
4. Stift nicht unnötig stark auf die Warze drücken.
5. Stift **maximal 20 Sekunden** auf gewöhnlichen Warzen und **maximal 40 Sekunden** auf Fußwarzen platzieren. (Lesen Sie auch den Abschnitt WAS IST EINE WARZE?).
6. Haut rundum die Warze nicht mit dem Stift antippen.
7. Die Stifte dürfen nur einmal verwendet werden.
8. Das Vereisungsmittel ist entzündlich und kann gesunde Haut vereisen.
9. Vereisungsbehälter nicht in der Nähe von Gesicht, anderen Körperteilen oder Kleidung halten.
10. Von offenem Feuer, Zündquellen, Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung und elektrostatischen und elektrischen Quellen fernhalten. Applikator nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.
11. In der Nähe des Applikators dürfen weder Zigaretten geraucht noch angezündet werden.
12. Vereisungsbehälter weder durchbohren noch verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
13. Das Behandlungsgel enthält eine ätzende Säure.
14. Vermeiden Sie den Kontakt mit Augen und Schleimhäuten. Wenn das Gel aus Versehen mit den Augen oder Schleimhäuten in Kontakt kommt, mit reichlich Wasser ausspülen und Kontakt mit dem Arzt aufnehmen.
15. Vermeiden Sie den Kontakt mit gesunder Haut rundum die Warze. Vor der Anwendung können Sie eine Salbe wie Vaseline auftragen, um die Haut rundum die Warze zu schützen.
16. Wenn das Gel mit gesunder Haut in Kontakt kommt, **Bereich sofort mit reichlich Seife und Wasser reinigen, um Reizung oder ein brennendes Gefühl der gesunden Haut zu vermeiden.**
17. Wenn Sie Probleme haben, das Gel präzise aufzutragen, beispielsweise auf der Fußsohle, bitten Sie jemanden um Hilfe.
18. Vermeiden Sie den Kontakt des Gels mit Kleidung, Schmuck, Stoffen oder Möbeln, weil sie dadurch beschädigt werden können.
19. Waschen Sie sich sofort nach der Anwendung die Hände (außer dem behandelten Bereich). Warten Sie 5 Minuten, nachdem Sie eine Warze an den Händen behandelt haben.
20. Nach der Anwendung können Gelrückstände im Applikator zurückbleiben. Deshalb ist Vorsicht angezeigt, wenn Sie den Applikator schließen und wieder öffnen.
21. Setzen Sie die behandelte Stelle keiner direkten Sonneneinstrahlung aus, bis die Haut wieder

normal aussieht. Dies kann 4 bis 6 Wochen dauern. Durch Sonneneinstrahlung kann eine Hautpigmentierungsstörung ausgelöst werden.

22. Behandelte Warze nicht berühren, weil die Warze ansteckend ist. Kratzen Sie auch nicht an der Warze, denn sie wird sich von sich aus ablösen.
23. Zur Gewährleistung der persönlichen Hygiene darf dieses Mittel nur von einer Person verwendet werden.
24. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn:
 - das stechende Gefühl anhält;
 - die Warze nach 3 Behandlungszyklen nicht verschwunden ist;
 - die Haut gereizt, gerötet oder schmerzhaft ist.

WAS KÖNNEN SIE ERWARTEN?

Während der Behandlung wird sich eine Hornhautschicht (verhärtete Hautschicht) auf der behandelten Warze bilden. Die Hornhaut wird allmählich verschwinden. Eine Blase, die vielleicht für das bloße Auge nicht sichtbar ist, wird unter der Warze gebildet. Wenn dies geschieht, werden die verdickte Haut der Warze zusammen mit dem Virus verschwinden oder sich ablösen.

Um zu überprüfen, ob die Warze verschwunden ist, können Sie die behandelte Stelle 5 Minuten in lauwarmes Wasser legen und die Hornhaut vorsichtig abfeilen. Wenn die Haut keine schwarzen Punkte (kleine Blutgefäße, typisch für Warzen) aufweist, wurde die Warze entfernt. Hornhaut ist keine Warze. Es kann einige Wochen dauern, bevor die Hornhaut verschwunden und das optimale Ergebnis sichtbar ist.

Die neue Haut wird weicher, hellrosa aussehen und innerhalb einiger Wochen wieder eine normale Farbe erhalten.

WER KANN EXCILOR® 2 IN 1 WARZEN-STOPP ANWENDEN?

Excilor® 2 in 1 Warzen-Stopp kann von Erwachsenen und Kindern ab dem 4. Lebensjahr verwendet werden. Erwachsene müssen Kinder behandeln.

Wenn Sie schwanger sind, stillen, Diabetes, Blutkreislaufstörungen oder eine Hauterkrankung haben, empfiehlt es sich, den Arzt vor der Anwendung um Rat zu fragen.

WAS SIND MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN?

Anwendung auf der gesunden Haut kann ein stechendes, leicht brennendes oder schmerzhaftes Gefühl auf der behandelten Haut auslösen, was die Haut schädigen kann. Wenn das stechende, brennende oder schmerzhaftes Gefühl bis zur nächsten Behandlung andauert, sollte die Behandlung abgebrochen werden.

- Komplikationen kommen nicht häufig vor. Die Bildung dauerhafter Flecken oder Narben ist sehr selten. Dies geht meistens mit anormalen Bedingungen wie Genesungsstörungen oder Infektionen einher. Nehmen Sie in diesem Fall bitte Kontakt mit Ihrem Arzt auf.
- Wie bei allen Vereisungsbehandlungen kann die Haut vorübergehend weiß werden.
- Durch Auftragen des Vereisungsmittels kann ein juckendes, stechendes, schmerzhaftes Gefühl während und nach der Vereisung ausgelöst werden, das nach Abtauen der Haut schnell verschwindet.
- Eine zu lange Exposition gegenüber dem Vereisungsmittel kann die oberste Hautschicht schädigen, was zu Narben oder sogar Nervenschäden führt.

WAS SIND DIE INHALTSSTOFFE?

Cryo-Active™, TCA-Active™ (auf der Basis von Trichloroessigsäure), Carbopol, Aqua.

LAGERUNGSHINWEISE



Für Kinder unzugänglich aufbewahren.



15 °C 25 °C

In der Originalpackung bei Zimmertemperatur (15 bis 25 °C) und vor Sonnenlicht geschützt lagern.



Von offenem Feuer, Zündquellen, Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung und elektrostatischen und elektrischen Quellen fernhalten. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.

Nach jeder Verwendung den Stift des Gel-Applikators sorgfältig mit einem Papiertaschentuch reinigen und den Applikator gut verschließen. Nicht nach dem auf dem Applikator und der Umverpackung angegebenen Haltbarkeitsdatum verwenden. Nach dem Öffnen ist das Produkt noch 6 Monate haltbar.

DIESE PACKUNG ENTHÄLT

- Einen Applikator mit 2 Produkten:
 - Einen 11,5 ml e Vereisungsbehälter mit Stifthalter
 - Einen 1 ml TCA-Active™ Gelapplikator
- Beutel mit 5 Stiften
- Gebrauchsanweisungen

WIE VERWENDEN SIE EXCILOR® 2 IN 1 WARZEN-STOPP?

Siehe Rückseite der Gebrauchsanweisung ➡

V00009.indd 1

25-04-19 10:59

WIE VERWENDEN SIE EXCILOR® 2 IN 1 WARZEN-STOPP?

Tag 1 : Vereisungsmittel auftragen ❄️ Erwachsene und Kinder: **nur einmal**.
Tag 2, 3, 4, 5: Gel auftragen 💧 Erwachsene: **2x täglich**. Kinder von 4 bis 12 Jahre: **1x täglich**.

Wenn Excilor® 2 in 1 Warzen-Stopp zum ersten Mal verwendet wird, **behandeln Sie zuerst nur eine Warze**, bevor Sie mit der Behandlung mehrerer Warzen beginnen, um die Wirkung auf der Haut zu prüfen. Behandeln Sie andere Warzen, wenn Sie keine Nebenwirkungen feststellen (normalerweise innerhalb von 5 Tagen). Wenn sich mehrere Warzen dicht nebeneinander befinden (innerhalb von 1 cm), warten Sie, bis sich die Haut regeneriert hat, bevor Sie andere Warzen behandeln (dies kann bis zu 6 Wochen dauern).

Wenn die Warze nicht ganz verschwindet, kann **die Behandlung bis zu dreimal wiederholt werden**. Wiederholen Sie die vollständige Behandlung erst nach mindestens **4 Tagen bis zu einer Woche**. Lesen Sie den Abschnitt WAS KÖNNEN SIE ERWARTEN?, damit Sie besser überprüfen können, ob die Warze ganz verschwunden ist oder nicht.

Hinweis: Wenn die behandelte Warze mit Hornhaut bedeckt ist, empfiehlt es sich, vor der Behandlung die Hand oder den Fuß zuerst 5 Minuten in lauwarmes Wasser zu legen und die Hornhaut zu entfernen.

❄️ **Tag 1 - VEREISUNG | Produkt 1**

VORBEREITUNG:





1. Lesen Sie die gesamte Gebrauchsanweisung oder schauen Sie sich das Video an. Entfernen Sie den Sicherheitsaufkleber.



Video-Anweisung



2. Öffnen Sie das Produkt 1.
Drehen Sie von 🔒 → 📁.

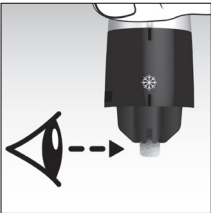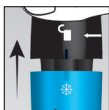


3. Überprüfen Sie, ob das Schwämmchen im Halter steckt.


HINWEIS: Bei der zweiten Anwendung ein neues Schwämmchen in den schwarzen Schwammhalter stecken. Verwendete Schwämmchen nicht wiederverwenden.

BEHANDLUNG:

HINWEIS: Lesen Sie zuerst die Schritte 4 bis 8! Verwenden Sie eine Zeitschaltuhr.

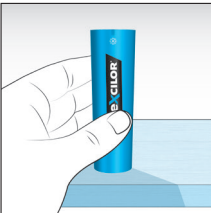

4. Positionieren Sie Produkt 1 während der gesamten Behandlung stabil auf dem Tisch.

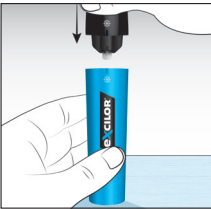

5. Richten Sie die Symbole ❄️ auf einer Linie aus. Weder drehen noch eindrücken.



6. 1 Sekunde lang **KRÄFTIG DRÜCKEN**. Danach schwarzen Stifthalter vom blauen Behälter ziehen.

HINWEIS: Wenn Sie zu lange gedrückt haben, kann ungefährliche, kalte Flüssigkeit aus dem Applikator entweichen. Die Flüssigkeit ist sehr kalt, aber ungefährlich. Waschen Sie sie sofort ab, falls sie mit gesunder Haut in Kontakt kommt.




7. **WARTEN SIE 20 Sekunden**, bis eine optimale Temperatur erreicht wird. Es werden ein Eisüberzug und ungefährliches Kondenswasser gebildet.



8. **DRÜCKEN SIE 20 Sekunden LEICHT** auf die Warze.

HINWEIS: 40 Sekunden auf Fusswarzen bzw. Dornwarzen oder Hornhaut.

NACH DER BEHANDLUNG:

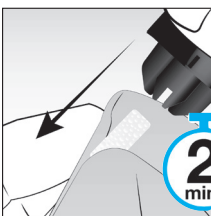

9. Warten Sie 2 Minuten, bevor Sie mit einem Papiertaschentuch den Stift entfernen und wegwerfen.

HINWEIS: Um eine andere Warze zu behandeln, die Schritte ab Schritt 3 wiederholen.




10. Applikator wieder zudrehen, bis Sie ein Klicken hören 🔒 → 🔒.
Nicht eindrücken.





💧 **Tag 2, 3, 4, 5 - GEL | Produkt 2**

VORBEREITUNG:

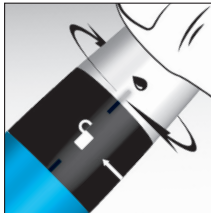

1. Öffnen Sie Produkt 2.
Sorgen Sie dafür dass 💧 und 🔒 parallel sind und ziehen Sie zum Öffnen.

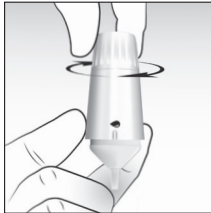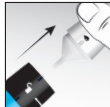


2. - **Halten Sie den Gel-Applikator vertikal.**
- Drehen Sie das Ende des Gel-Applikators im Uhrzeigersinn.
- Drehen Sie bis zum «Klick», um Gel aus der Spitze abzugeben.
- Wischen Sie die Spitze ab und lassen Sie es einmal klicken für eine genaue Dosis.

HINWEIS: Bei der ersten Anwendung: Mehrere (bis zu 8) volle Umdrehungen können notwendig sein, um genug Druck zu erzeugen, um die luftdichte Versiegelung zu durchbrechen und das Gel in die Spitze zu befördern.

BEHANDLUNG:


HINWEIS: Zuerst Schritte 3 bis 8 lesen! Verwenden Sie eine Zeitschaltuhr.

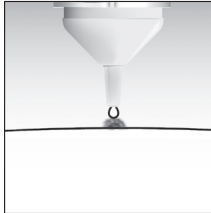

3. Tragen Sie **einen Tropfen** (ein Klick) **genau** auf die Warze auf. Wenn ein Tropfen nicht ausreicht, um die vollständige Warze zu bedecken, tragen Sie noch einen Geltropfen auf.




Wenn das ätzende Gel versehentlich mit gesunder Haut in Kontakt kommt, reinigen Sie den gesamten Bereich sofort mit Seife und Wasser, um eine Reizung oder ein brennendes Gefühl der gesunden Haut zu vermeiden.

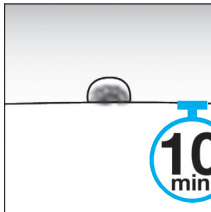

4. Warten Sie **10 bis 15 Minuten**, bevor Sie Socken, Schuhe oder Handschuhe anziehen.

NACH DER BEHANDLUNG:

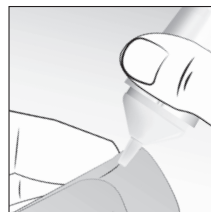

5. Stift mit Papiertaschentuch reinigen.



6. Applikator wieder zudrehen.
Drehen Sie von 🔒 → 🔒.



7. Sonnenlichereinstrahlung 4 bis 6 Wochen vermeiden.



8. Behandlung **zweimal täglich 4 Tage lang wiederholen**.

HINWEIS: Für Kinder von 4 bis 12 Jahre: Gel nur einmal täglich auftragen.

HERSTELLER
Medical Brands
Innovations B.V.,
Piet Heinkade 199,
1019 HC Amsterdam,
Niederlande.

VERTREIBER
VERFORA AG
CH-1752 Villars-sur-Glâne

Die Gebrauchsanweisungen wurden zuletzt im März 2019 überarbeitet.



100CAVE.CH.GE.I.OO
203046/01

Printproof

ATTENTION!

We need an approved proof before we can start the production.

Please fill in this form in clear writing.

Date:	25-04-2019	Proof no.: 1
Order no.:	365306	
Product Code:	732027 04/19 Wartpen CH/GE	
Article no. Dobber:	V00009	
Size:	196 x 410 mm	DOBBER HEALTHCARE LEAFLETS
Folded:	98 x 41 mm	
Print color(s)		Dobber Healthcare Leaflets BV
Front:	Zwart ■ en Cyaan ■	Westerwerf 13
Back:	Zwart ■ en Cyaan ■	1911 JA Uitgeest
Square (oversteek):	-	Phone +31 (0)251 31 19 50
Optical code:	-	E-mail: info@dobberpharma.com
Pharma code:	-	www.dobberpharma.com
Font:	-	
Font size:	-	
Leading:	-	

Approved: ☐ YES ☐ NO

Date:

Name and signature:
[This form belongs to SOP "Werksaamheden DTP-Studio".]

Kwaliteit ISO 9001

Duurzaamheid ISO 14001

DEKRA

DEKRA

Proefsticker DHL (Mac-/Server/Proefsticker DHL 15112016, 10)