

INHALT DIESER PACKUNG



Stift zur Warzenbehandlung



Beutel mit Aufsätzen zum Vereisen



Gebrauchsanweisung

SIE BENÖTIGEN



Papiertaschentücher



Stoppuhr

2 PRODUKTE IN 1 STIFT

Produkt 1: VEREISUNG

Produkt 2: GEL-APPLIKATOR



Stifthalter

Behälter mit Vereisungsmittel

NUR TAG 1

TAG 2 TAG 3 TAG 4 TAG 5



Gel-Applikator



Kinder: 1x pro Tag

Erwachsene: 2x pro Tag

VOR GEBRAUCH DIE GESAMTE GEBRAUCHSANWEISUNG LESEN

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.



Video-Anweisung auf excilor.com

WAS SIE WISSEN SOLLTEN, BEVOR SIE EXCILOR® WARZENBEHANDLUNG 2IN1 ANWENDEN

Verwenden Sie Excilor® Warzenbehandlung 2in1 nicht:

- Wenn sich die Warze nicht auf einer Hand oder einem Fuß befindet;
- Auf einer blutenden, gereizten oder entzündeten Haut oder einer Haut, die Entzündungssymptome, wie Juckreiz oder Schwellung, aufweist;
- Auf Stielwarzen, Muttermalen, dunklen Flecken der Haut, Sommersprossen, Dellwarzen (Mollusca contagiosa), Alterswarzen (Verruca seborrhoica) oder einer schuppigen Haut;
- Wenn Sie nicht sicher sind, ob es sich tatsächlich um eine Warze handelt;
- Wenn Sie überempfindlich gegen einen der Inhaltsstoffe sind.

Wenn Sie sich unsicher sind, ob es sich um eine Warze handelt, kontaktieren Sie vor der Anwendung Ihren Arzt.

⚠️ Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

1. NUR für Warzen auf Händen und Füßen.
2. Vereisungsmittel weder schlucken noch einatmen, nur in gut gelüfteten Räumen verwenden.
3. Nur in Kombination mit den mitgelieferten Aufsätzen zum Vereisen verwenden.
4. Keinen übermäßigen Druck ausüben, wenn Sie den Vereisungsstift auf die Warze drücken.
5. Vereisungsstift maximal 20 Sekunden auf gewöhnliche Warzen und maximal 40 Sekunden auf Fußwarzen drücken. (Lesen Sie auch den Abschnitt WAS IST EINE WARZE?).
6. Die Haut um die Warze nicht mit dem Vereisungsstift berühren.
7. Die Vereisungsstifte dürfen nur einmal verwendet werden.
8. Das Vereisungsmittel ist entzündlich und kann auf gesunder Haut Erfrierungen verursachen.
9. Den Behälter mit dem Vereisungsmittel nicht in der Nähe von Gesicht, anderen Körperteilen oder Kleidung halten.
10. Von offenem Feuer, Zündquellen, Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung und elektrostatischen und elektrischen Quellen fernhalten. Setzen Sie das Produkt nicht Temperaturen über 50 °C aus.
11. In der Nähe des Produktes dürfen weder Zigaretten geraucht noch angezündet werden.
12. Den Behälter mit dem Vereisungsmittel weder durchbohren noch verbrennen, auch nicht nach dem Gebrauch.
13. Das Behandlungsgel enthält eine ätzende Säure.
14. Vermeiden Sie den Kontakt mit Augen und Schleimhäuten. Wenn das Gel aus Versehen mit den Augen oder Schleimhäuten in Kontakt kommt, mit reichlich Wasser ausspülen und einen Arzt kontaktieren.
15. Vermeiden Sie den Kontakt mit der gesunden Haut um die Warze. Vor der Anwendung des Gels können Sie eine Salbe wie Vaseline auftragen, um die Haut um die Warze zu schützen.
16. Wenn das Gel versehentlich mit gesunder Haut in Kontakt kommt, den entsprechenden Bereich sofort mit reichlich Seife und Wasser reinigen, um Reizungen oder Verbrennungen der gesunden Haut zu vermeiden.
17. Wenn Sie Probleme haben, das Gel präzise aufzutragen, beispielsweise auf der Fußsohle, bitten Sie jemanden um Hilfe.
18. Vermeiden Sie den Kontakt des Gels mit Kleidung, Schmuck, Stoffen oder Möbeln, da diese dadurch beschädigt werden können.
19. Waschen Sie sich sofort nach der Anwendung die Hände (außer den behandelten Bereich). Warten Sie 5 Minuten, nachdem Sie eine Warze an den Händen behandelt haben.
20. Nach der Anwendung können geringe Gelrückstände im Applikator zurückbleiben. Deshalb ist Vorsicht geboten, wenn Sie den Applikator schließen und wieder öffnen.

21. Setzen Sie die behandelte Stelle keiner direkten Sonneneinstrahlung aus, bis die Haut wieder normal aussieht. Dies kann 4 bis 6 Wochen dauern. Eine Hyper- oder Hypopigmentierung kann aufgrund der Sonneneinstrahlung auftreten.

22. Die behandelte Hautstelle nicht berühren, da Warzen ansteckend sind. Kratzen Sie auch nicht an der Warze, da diese von alleine abfallen soll.

23. Zur Gewährleistung der persönlichen Hygiene darf dieses Produkt nur von einer Person verwendet werden.

24. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn:

- Ein stechendes Gefühl anhält;
- Die Warze nach 3 Behandlungszyklen nicht verschwunden ist;
- Die Haut gereizt, gerötet oder schmerzhaft ist.

WAS IST ZU ERWARTEN?

Während der Behandlung wird sich eine Hornhautschicht (verhärtete Hautschicht) auf der behandelten Warze bilden. Diese wird allmählich verschwinden. Eine Blase, die vielleicht für das bloße Auge nicht sichtbar ist, kann sich unter der Warze bilden. Wenn dies geschieht, wird die verdickte Haut der Warze zusammen mit dem verantwortlichen Virus verschwinden oder abfallen.

Um zu überprüfen, ob die Warze verschwunden ist, können Sie die behandelte Stelle 5 Minuten in lauwarmes Wasser eintauchen und die Hornhaut vorsichtig abfeilen. Wenn die Haut keine schwarzen Punkte (kleine Blutgefäße, typisch für Warzen) aufweist, wurde die Warze entfernt.

Die Hornhaut ist keine Warze. Es kann einige Wochen dauern, bevor die Hornhaut verschwindet und das optimale Ergebnis sichtbar wird. Die neue Haut wird weicher erscheinen, hellrosa aussehen und innerhalb einiger Wochen wieder eine normale Farbe annehmen.

WAS IST EINE WARZE?

Gewöhnliche Warzen (Verruca vulgaris) und Fußwarzen (Verruca plantaris) erscheinen auf der Haut als kleine, raue „blumenkohlähnliche“ Wucherungen, die durch humane Papillomaviren (HPV) verursacht werden. Gewöhnliche Warzen treten meistens auf Händen, Fingern oder Zehen auf. Fußwarzen kommen meistens auf der Fußsohle oder auf der Ferse vor und sind oft etwas flacher, härter und schmerzen beim Gehen oder Stehen. Beide Warzentypen sind hoch ansteckend und drei von vier Personen bekommen im Laufe ihres Lebens eine Warze.

WIE WIRKT EXCILOR® WARZENBEHANDLUNG 2in1?

Excilor® Warzenbehandlung 2in1 ist ein Medizinprodukt für eine effektive und schnell wirkende Behandlung von gewöhnlichen Warzen und Fußwarzen. Excilor® Warzenbehandlung 2in1 enthält ein Produkt mit einem Vereisungsmittel und ein Produkt mit einem Gel, das auf dem wirksamen Bestandteil TCA-Active™ basiert, wodurch die Kryotherapie mit der Gelbehandlung in einem Produkt kombiniert wird. Indem der Kern der Warze schnell vereist und die infizierte Haut entfernt wird, werden die zwei meistverwendeten Behandlungen für schnellere Ergebnisse kombiniert. Sowohl die verdickte Warzenhaut als auch der verantwortliche Virus werden entfernt und es erscheint neue, gesunde Haut.

ANWENDUNG MIT ANDEREN BEHANDLUNGEN UND/ODER ARZNEIMITTELN

Nicht in Kombination mit anderen Warzenbehandlungen

anwenden. Es sind keine Wechselwirkungen mit Arzneimitteln bekannt, sofern die Gebrauchsanweisungen befolgt werden.

⚠️ WER KANN EXCILOR® WARZENBEHANDLUNG 2in1 VERWENDEN?

Excilor® Warzenbehandlung 2in1 kann von Erwachsenen und Kindern ab dem 4. Lebensjahr verwendet werden. Die Behandlung bei Kindern sollte von Erwachsenen übernommen werden.

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, Diabetes, Kreislauf- oder Hautprobleme haben, empfiehlt es sich, einen Arzt vor der Anwendung um Rat zu fragen.

WAS SIND MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN?

Eine Anwendung auf der gesunden Haut kann ein stechendes, leicht brennendes oder schmerzhaftes Gefühl im behandelten Bereich auslösen, was die Haut schädigen kann. Wenn das stechende, brennende oder schmerzhaftes Gefühl bis zur nächsten Anwendung andauert, sollte die Behandlung abgebrochen werden.

- Komplikationen sind selten. Die Bildung von dauerhaften Flecken oder Narben kommt sehr selten vor. Dies kann auf Heilungsstörungen oder Infektionen beruhen. Nehmen Sie in diesem Fall bitte Kontakt mit Ihrem Arzt auf.
- Wie bei allen Vereisungsbehandlungen kann die Haut vorübergehend weiß werden.
- Durch die Anwendung des Vereisungsmittels kann ein juckendes, stechendes, schmerzhaftes Gefühl während und nach der Vereisung ausgelöst werden, das nach dem Ende der Behandlung schnell verschwindet.
- Wird die Haut dem Vereisungsmittel zu lange ausgesetzt, können die oberen Hautschichten geschädigt werden, was zu Narben und/oder Nervenschäden führen kann.

WAS SIND DIE INHALTSSTOFFE?

Cryo-Active™, TCA-Active™ (auf der Basis von Trichloressigsäure), Carbopol, Wasser.

LAGERBEDINGUNGEN

- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- In der Originalpackung bei Zimmertemperatur (15 bis 25 °C) und vor Sonnenlicht geschützt lagern.
- Von offenem Feuer, Zündquellen, Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung und elektrostatischen und elektrischen Quellen fernhalten. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.

Nach jeder Verwendung die Spitze des Gelapplikators sorgfältig mit einem Papiertaschentuch reinigen und den Applikator gut verschließen.

Nicht nach dem auf dem Stift und der Verpackung angegebenen Haltbarkeitsdatum verwenden. Nach dem Öffnen ist das Produkt noch 6 Monate haltbar.

WAS IST DER INHALT DIESER PACKUNG?

- Ein Stift mit 2 Produkten:
- Ein 11,5 ml Behälter mit Vereisungsmittel, ein Stifthalter und Aufsätze zum Vereisen
- Ein 1 ml TCA-Active™ Gelapplikator
- Beutel mit 5 Stiften
- Gebrauchsanweisungen

WIE VERWENDEN SIE EXCILOR® WARZENBEHANDLUNG 2IN1?

Siehe Rückseite der Gebrauchsanweisung



WIE VERWENDEN SIE EXCILOR® WARZENBEHANDLUNG 2in1?

Tag 1: Kryotherapie anwenden ❄️. Erwachsene und Kinder: **nur einmal**.
Tag 2, 3, 4, 5: Gel auftragen 🧴. Erwachsene: 2x täglich; Kinder zwischen 4 und 12 Jahren: 1x täglich.

Wenn Excilor® zum ersten Mal verwendet wird, **behandeln Sie zuerst nur eine Warze**, bevor Sie mit der Behandlung mehrerer Warzen beginnen, um die Wirkung auf der Haut zu prüfen. Behandeln Sie andere Warzen, wenn Sie keine Nebenwirkungen feststellen (normalerweise innerhalb von 5 Tagen). Wenn sich mehrere Warzen dicht nebeneinander befinden (innerhalb von 1 cm), warten Sie, bis sich die Haut regeneriert hat, bevor Sie andere Warzen behandeln (dies kann bis zu 6 Wochen dauern).

Wenn die Warze nicht ganz verschwindet, **kann die Behandlung bis zu dreimal wiederholt werden**. Wiederholen Sie die vollständige Behandlung erst nach mindestens **4 Tagen oder nach einer Woche**. Lesen Sie den Abschnitt **WAS IST ZU ERWARTEN?**, damit Sie besser überprüfen können, ob die Warze ganz verschwunden ist oder nicht.

Hinweis: Wenn die behandelte Warze mit Hornhaut bedeckt ist, empfiehlt es sich, vor der Behandlung den Fuß zuerst 5 Minuten in lauwarmes Wasser einzutauchen und die Hornhaut vorsichtig mit einer Feile zu entfernen.

Tag 1 - VEREISUNG | Produkt 1

VORBEREITUNG:





1. Lesen Sie die gesamte Gebrauchsanweisung oder schauen Sie sich das Video an. Entfernen Sie den Sicherheitsaufkleber.



Video-Anweisung



2. Öffnen Sie das Produkt 1. Drehen Sie von 🔒 → 🔓

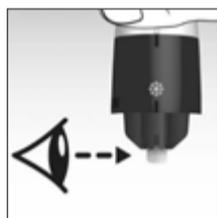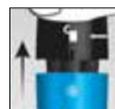

3. Überprüfen Sie, ob der Aufsatz zum Vereisen im Halter steckt.
HINWEIS: Bei der zweiten Anwendung einen neuen Aufsatz in den schwarzen Stifthalter stecken. Bereits verwendete Aufsätze nicht wiederverwenden.

BEHANDLUNG:

HINWEIS: Lesen Sie zuerst die Schritte 4 bis 8! Verwenden Sie eine Stoppuhr.



4. Positionieren Sie Produkt 1 während der gesamten Behandlung sicher auf dem Tisch.



5. **Richten** Sie die Symbole ❄️ zueinander aus. **Weder nach unten drehen oder drücken.**



6. **1 Sekunde lang KRÄFTIG DRÜCKEN.** Den schwarzen Stifthalter danach vom blauen Behälter mit Vereisungsmittel heben.

HINWEIS: Wenn Sie zu lange gedrückt haben, kann kalte Flüssigkeit aus dem Produkt entweichen. Waschen Sie sie sofort ab, falls sie mit gesunder Haut in Kontakt kommt.



7. **WARTEN SIE 20 Sekunden**, bis eine optimale Temperatur erreicht wird. Es wird ein Eisüberzug und ungefährliches Kondenswasser gebildet.



8. **DRÜCKEN SIE 20 Sekunden** leicht auf die Warze.
HINWEIS: 40 Sekunden auf Warzen an Füßen mit dickerer Haut oder Hornhaut.



NACH DER BEHANDLUNG:



9. **Warten Sie 2 Minuten**, bevor Sie mit einem Papiertaschentuch den Aufsatz entfernen und wegwerfen.

HINWEIS: Um eine andere Warze zu behandeln, die Schritte ab Schritt 3 wiederholen.




10. Stift wieder zudrehen, 🔓 → 🔒 **bis Sie ein Klicken hören. Nicht drücken.**



Tag 2, 3, 4, 5 - GEL | Produkt 2

VORBEREITUNG:

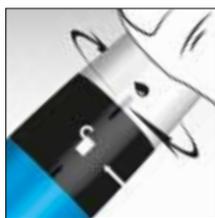

1. Öffnen Sie Produkt 2. **Sorgen Sie dafür, dass** 🧴 und 🔒 parallel zueinander stehen und ziehen Sie zum Öffnen.



2. - Halten Sie den Gel-Applikator vertikal.
- Drehen Sie das Ende des Gel-Applikators im Uhrzeigersinn.
- Drehen Sie bis zum «Klick», damit Gel aus der Spitze abgegeben wird.
- Wischen Sie die Spitze ab und lassen Sie es für eine genaue Dosierung einmal klicken.

HINWEIS: Bei der ersten Anwendung: Es können mehrere (bis zu 8) vollständige Umdrehungen notwendig sein, um genug Druck zu erzeugen, sodass die luftdichte Versiegelung druchbrochen und das Gel in die Spitze befördert wird.

BEHANDLUNG:


Zuerst Schritte 3 bis 8 lesen! Verwenden Sie eine Stoppuhr.



3. Tragen Sie **einen Tropfen (ein Klick)** direkt auf die Warze auf. Wenn ein Tropfen nicht ausreicht, um die ganze Warze zu bedecken, tragen Sie noch einen Geltropfen auf.



Wenn das ätzende Gel versehentlich mit gesunder Haut in Kontakt kommt, reinigen Sie den gesamten Bereich sofort mit Seife und Wasser, um eine Reizung oder ein brennendes Gefühl auf der gesunden Haut zu vermeiden.

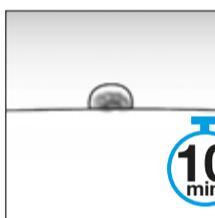

4. **Warten Sie 10 bis 15 Minuten**, bevor Sie Socken, Schuhe oder Handschuhe anziehen.



NACH DER BEHANDLUNG:



5. **Spitze** mit einem Papiertaschentuch reinigen.



6. Applikator wieder zudrehen. **Drehen Sie von** 🔓 → 🔒



7. **Sonnenlichteinstrahlung** für 4 bis 6 Wochen vermeiden.



8. Behandlung **zweimal täglich 4 Tage** lang wiederholen.

HINWEIS: Für Kinder von 4 bis 12 Jahren: Gel nur **einmal täglich** auftragen.

HERSTELLER

Medical Brands Innovations B.V., Piet Heinkade 199, 1019 HC Amsterdam, Niederlande.

Vertrieb in Österreich

GSK-Gebro Consumer Healthcare GmbH, 6391 Fieberbrunn

Die Gebrauchsanweisung wurde zuletzt im Juni 2019 überarbeitet.



100CAVE.AT1.00