

Excilor®

Warts Trattamento Acido



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare il prodotto. Excilor® Warts Trattamento Acido contiene un gel efficace ma altamente corrosivo. Per una buona riuscita del trattamento è necessario seguire ogni passo di queste istruzioni per l'uso. Conservare le istruzioni per l'uso in quanto potrebbe essere necessario leggerle di nuovo. In caso di domande, consultare il proprio medico di famiglia o il farmacista.



COME FUNZIONA EXCILOR® WARTS TRATTAMENTO ACIDO?

Excilor® Warts Trattamento Acido contiene un gel, a base dell'ingrediente medico attivo TCA-Active™ che induce il peeling della pelle infetta. La pelle ispessita della verruca e il suo virus causativo vengono rimossi e comparirà una nuova pelle sana.

Excilor® Warts Trattamento Acido è un dispositivo medico di automedicazione per il trattamento efficace e rapido delle verruche comuni e delle verruche ai piedi. Con il tampone di cotone monouso il gel si applica facilmente sulla verruca.

COSA DEVI SAPERE PRIMA DI USARE EXCILOR® WARTS TRATTAMENTO ACIDO

Non usare Excilor® Warts Trattamento Acido :

- Se la verruca è posizionata in un'area **diversa da piede o mano**;
- Su cute lesa, irritata o infiammata o su pelle che mostra un qualsiasi segno di infiammazione come prurito o gonfiore;
- Su fibromi penduli, nei, macchie scure della pelle, lentiggini, verruche d'acqua (mollusco contagioso), cheratosi seborroica (verruca seborroica), o pelle esfoliata;
- In caso di ipersensibilità a uno dei componenti.

Se non si è sicuri che si tratti di una verruca, consultare il medico di famiglia prima dell'utilizzo.

⚠ Avvertenze e precauzioni

- **Excilor® Warts Trattamento Acido** contiene un acido corrosivo. Solo per verruche su mani e piedi. Non applicare il gel sulla pelle sana circostante alla verruca.
- Usare solamente il tampone di cotone monouso fornito per una applicazione precisa.
- In caso di contatto con la pelle sana, **lavare immediatamente la zona d'interesse con sapone e acqua in abbondanza in modo da prevenire irritazioni o sensazione di bruciore della pelle sana**. Si può usare un unguento come la vaselina per proteggere l'area circostante prima di applicare il gel. Se si ha difficoltà nell'applicare il gel con precisione, ad esempio sulla pianta del piede, chiedere assistenza.
- In caso di primo utilizzo, applicare inizialmente il gel su una singola verruca prima di trattare molteplici verruche.
- Non esporre la zona trattata alla luce solare finché la pelle non è tornata alla normalità. Questo potrebbe richiedere dalle 4 alle 6 settimane. L'iper- o ipo-pigmentazione della pelle può verificarsi a causa dell'esposizione alla luce solare.
- Non toccare o spremere la zona di pelle infettata, in quanto le verruche sono contagiose. Non staccare la crosta, dovrà cadere da sola.
- Evitare il contatto con gli occhi e con le mucose. In caso di contatto accidentale con occhi o mucose sciacquare abbondantemente con acqua e richiedere assistenza medica.
- Per questioni di igiene personale, il tampone di cotone monouso deve essere usato solo da una persona. Il tampone deve essere gettato dopo ogni utilizzo.
- Evitare il contatto del tampone di cotone monouso con vestiti, gioielli, tessuti o mobili in quanto potrebbe danneggiarli.
- Dopo l'uso, potrebbero essere rimasti residui di gel nel tampone di cotone monouso, si raccomanda pertanto di prestare attenzione al momento dello smaltimento.

- Si raccomanda attenzione nella chiusura e riapertura del flacone.

- Consultare il medico di famiglia se:
 - La verruca non è scomparsa dopo 4 trattamenti (4 settimane)
 - Si verifica un'irritazione, arrossamento o in caso di dolore

CHI PUO' USARE EXCILOR® WARTS TRATTAMENTO ACIDO?

Excilor® Warts Trattamento Acido può essere utilizzato da adulti e bambini a partire da 4 anni. Nei bambini si raccomanda l'applicazione del trattamento da parte di un adulto. Per i bambini è raccomandata un'applicazione al giorno, vedere le istruzioni sotto COME UTILIZZARE EXCILOR® WARTS TRATTAMENTO ACIDO

Durante la gravidanza o allattamento o nel caso di paziente diabetico, di problemi di cattiva circolazione del sangue o malattie della pelle, consultare il medico di famiglia prima dell'utilizzo.

COME UTILIZZARE EXCILOR® WARTS TRATTAMENTO ACIDO?

Preparazione al trattamento:

1. Durante il trattamento: non tenere il flacone in mano ma riporlo per l'intera durata dell'applicazione.
2. Per rimuovere il cappuccio di sicurezza per bambini, premere il tappo e girare in senso antiorario per aprire.

Se usato per la prima volta: applicare il gel inizialmente su una singola verruca prima di trattare molteplici verruche, in modo da testare l'effetto sulla propria pelle. Iniziare a trattare un'altra verruca solo se non si verificano effetti collaterali (normalmente entro 5 giorni).

Se ci sono più verruche vicine tra di loro (entro 1 cm), attendere fino a quando la pelle non sia guarita prima di trattare l'altra verruca (questo può richiedere fino a 6 settimane).

Applicare il trattamento:

1. Immergere con cautela il tampone di cotone nella formulazione gel.
2. Prestando attenzione, toccare delicatamente 1 o 2 volte la verruca con il tampone di cotone fino a ricoprirla completamente, evitando il contatto con la pelle sana circostante.
3. **Se il gel entra accidentalmente in contatto con la pelle sana, lavare immediatamente l'intera area con acqua e sapone in abbondanza per evitare irritazioni o la sensazione di bruciore della pelle sana.** Si può usare un unguento come la vaselina per proteggere l'area circostante prima di applicare il gel.

Se si ha difficoltà nell'applicare il gel con precisione, ad esempio sulla pianta del piede, chiedere assistenza.

4. Lasciare asciugare il gel per 10-15 minuti prima di mettere calze, scarpe o guanti.
5. Smaltire correttamente il tampone di cotone e richiudere saldamente il flacone.

Ripetere il trattamento **2 volte al giorno per 4 giorni. Per i bambini con piccole verruche, applicare il gel 1 volta al giorno.**

Dopo il trattamento:

1. Non esporre la zona trattata alla luce solare finché la pelle non è tornata alla normalità.
2. Se la verruca non scompare completamente, ripetere il trattamento dopo un intervallo di 4 giorni. Il ciclo di trattamento può essere ripetuto fino a 4 volte per rimuovere completamente la verruca.

NOTA: Quando si tratta una verruca coperta da callo, si consiglia di immergere il piede in acqua tiepida per 5 minuti e strofinare accuratamente il callo con una lima abrasiva prima del trattamento.

COSA ASPETTARSI?

Immediatamente dopo l'applicazione potrebbe comparire una macchia bianca sulla pelle. Durante il trattamento, la pelle diventerà più scura e inizierà a squamare formando una crosta. La squamazione è un processo naturale e dura 1 o 2 settimane dopo il periodo di trattamento. La pelle nuova apparirà più liscia, rosata e riacquisterà il suo naturale colore nelle settimane successive.

COS'È UNA VERRUCA?

Le verruche comuni (verruca vulgaris) e le verruche plantari (verruca plantaris) appaiono sulla pelle come piccole escrescenze rugose, causate dall'infezione da papillomavirus umano (HPV). Le verruche comuni si verificano per lo più sulle mani, le dita delle mani o dei piedi. Le verruche plantari si sviluppano principalmente sulla pianta del piede o sul tallone e tendono ad essere più piatte, più dure e sono spesso dolorose quando si cammina o si sta in piedi. Entrambe sono altamente contagiose e colpiscono tre persone su quattro nell'arco della vita. In caso di dubbio, consultare il proprio medico di famiglia prima del trattamento.

INTERAZIONE CON ALTRI TRATTAMENTI E/O FARMACI

Non utilizzare con altri trattamenti per le verruche.

Non sono note interazioni con altri medicinali, se il prodotto viene utilizzato come da foglietto illustrativo.

QUALI SONO I POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI?

Se usato su pelle sana, può provocare una sensazione di prurito, lieve bruciore o dolore nell'area trattata, che può causare danni alla pelle. In caso di eventuali effetti collaterali, interrompere immediatamente il trattamento. Lavare la pelle con sapone e acqua in abbondanza per prevenire irritazioni.

Le complicazioni non sono frequenti. È estremamente raro che si verifichi un segno permanente o una cicatrice. Questo potrebbe essere in gran parte correlato ad un'anomalia nel processo di guarigione o a un'infezione. In tal caso, interrompere il trattamento e consultare il medico di famiglia.

INGREDIENTI

TCA-Active™ (basato su Acido Tricloroacetico), Carbopol, Acqua.

COME CONSERVARE IL PRODOTTO?



Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.



Conservare il flacone nella confezione originale a temperatura ambiente (15-25 °C) e tenere lontano dalla luce solare.



Smaltire correttamente il tampone di cotone monouso e richiudere saldamente il flacone dopo l'utilizzo.



Non utilizzare dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta del flacone e sulla scatola esterna. Dopo la prima apertura, il prodotto deve essere utilizzato entro 6 mesi, non superare la data di scadenza.

COSA CONTIENE LA CONFEZIONE?

La confezione contiene 4 ml di **Excilor® Warts Trattamento Acido*** con cappuccio di sicurezza per bambini, istruzioni per l'uso e bustina con 32 tamponi di cotone monouso.

*Numero massimo di cicli di trattamento: 4

Ultima modifica del foglietto illustrativo: Settembre 2019

4WB.VE.IT.1.00

CE 2797



Medical Brands Innovations B.V.,
Piet Heinkade 199,
1019 HC Amsterdam,
Paesi Bassi.

Distributore:
Vemedica Pharma S.R.L.
Viale Tanara, 20/B
43121, Parma (PR), Italia

VE6679