

excILOR®

2in1 GEGEN WARZEN

INHALT DIESER VERPACKUNG



Applikator



Beutel mit Vereisungsstiften aus Schaumstoff



Gebrauchsanweisung

SIE BENÖTIGEN



Papiertaschentücher



Stoppuhr

2 PRODUKTE IN 1 APPLIKATOR

Produkt 1: VEREISUNG

Halterung für Vereisungsstift

Behälter mit Vereisungsmittel

NUR TAG 1

Produkt 2: GEL-APPLIKATOR

Gel-Applikator

TAG 2 TAG 3 TAG 4 TAG 5

Kinder von 4 bis 12:
1x pro Tag

Erwachsene:
2x pro Tag

VOR ANWENDUNG DIE GESAMTE GEBRAUCHSANWEISUNG LESEN

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.



Video-Anleitung:
www.excilor.de

WAS SIE WISSEN SOLLTEN, BEVOR SIE EXCILOR® 2IN1 GEGEN WARZEN

Verwenden Sie Excilor® 2in1 gegen Warzen nicht:

- wenn sich die Warze nicht auf einer Hand oder einem Fuß befindet;
- auf blutender, gereizter oder entzündeter Haut oder wenn die Haut Entzündungssymptome wie Juckreiz oder Schwellung aufweist.
- auf Stielwarzen, Muttermalen, dunklen Flecken, Wasserwarzen (Mollusca contagiosa), Alterswarzen (Verruca seborrhoica) oder auf abschuppender Haut;
- wenn Sie nicht sicher sind, ob es sich tatsächlich um eine Warze handelt;
- wenn Sie überempfindlich gegen einen der Inhaltsstoffe sind

Wenn Sie sich unsicher sind, ob es sich um eine Warze handelt, kontaktieren Sie vor der Anwendung Ihren Arzt.

⚠ Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

1. NUR für Warzen auf Händen und Füßen.
2. Vereisungsmittel weder einnehmen noch einatmen, nur in gut gelüfteten Räumen verwenden.
3. Nur in Kombination mit den mitgelieferten Vereisungsstiften verwenden.
4. Stift nicht unnötig stark auf die Warze drücken.
5. Stift maximal 20 Sekunden auf gewöhnlichen Warzen und maximal 40 Sekunden auf Fußwarzen platzieren. (Lesen Sie auch den Abschnitt WAS IST EINE WARZE?).
6. Haut rund um die Warze nicht mit dem Vereisungsstift berühren.
7. Vereisungsstifte dürfen nur einmal verwendet werden.
8. Das Vereisungsmittel ist entzündlich und kann auf gesunder Haut Erfrierungen verursachen.
9. Vereisungsbehälter nicht in der Nähe von Gesicht, anderen Körperteilen oder Kleidung halten.
10. Von offenem Feuer, Zündquellen, Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung und elektrostatischen und elektrischen Quellen fernhalten. Setzen Sie das Produkt nicht Temperaturen über 50 °C aus.
11. In der Nähe des Applikators dürfen Zigaretten weder geraucht noch angezündet werden.
12. Den Behälter mit dem Vereisungsmittel weder durchbohren noch verbrennen, auch nicht nach dem Gebrauch.
13. Das Behandlungsgel enthält eine ätzende Säure.
14. Vermeiden Sie den Kontakt mit Augen und Schleimhäuten. Wenn das Gel aus Versehen mit den Augen oder Schleimhäuten in Kontakt kommt, mit reichlich Wasser ausspülen und einen Arzt kontaktieren.
15. Vermeiden Sie den Kontakt mit gesunder Haut rund um die Warze. Vor der Anwendung können Sie eine Salbe wie Vaseline auftragen, um die Haut um die Warze zu schützen.
16. Wenn das Gel mit gesunder Haut in Kontakt kommt, Bereich sofort mit reichlich Seife und Wasser reinigen, um Reizungen oder Verbrennungen der gesunden Haut zu vermeiden.
17. Wenn Sie Probleme haben, das Gel präzise aufzutragen, z.B. auf der Fußsohle, bitten Sie jemanden um Hilfe.
18. Vermeiden Sie den Kontakt des Gels mit Kleidung, Schmuck, Stoffen oder Möbeln, weil sie dadurch beschädigt werden können.
19. Waschen Sie sich sofort nach der Anwendung die Hände (außer dem behandelten Bereich). Warten Sie 5 Minuten, nachdem Sie eine Warze an den Händen behandelt haben.
20. Nach der Anwendung können Gelrückstände im Applikator zurückbleiben. Deshalb ist Vorsicht geboten, wenn Sie den Applikator schließen und wieder öffnen.
21. Setzen Sie die behandelte Stelle keiner direkten Sonneneinstrahlung aus, bis die Haut wieder normal aussieht. Dies kann 4 bis 6 Wochen dauern. Durch Sonneneinstrahlung kann eine Hautpigmentierungsstörung ausgelöst werden.

22. Die behandelte Warze nicht berühren, weil Warzen ansteckend sind. Kratzen Sie auch nicht an der Warze, da diese von alleine abfallen soll.
23. Zur Gewährleistung der persönlichen Hygiene darf dieses Mittel nur von einer Person verwendet werden.
24. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn:
 - ein stechendes Gefühl an der behandelten Stelle anhält;
 - die Warze nach 3 Behandlungszyklen nicht verschwunden ist;
 - die Haut gereizt, gerötet oder schmerzhaft ist.

WAS IST BEI DER BEHANDLUNG ZU ERWARTEN?

Während der Behandlung wird sich eine **Hornhautschicht (verhärtete Hautschicht)** auf der behandelten Warze bilden. Die Hornhaut wird allmählich verschwinden. Eine Blase, die vielleicht für das bloße Auge nicht sichtbar ist, kann sich unter der Warze bilden. Wenn dies geschieht, wird die verdickte Haut der Warze zusammen mit dem Virus verschwinden oder abfallen.

Um zu überprüfen, ob die Warze verschwunden ist, können Sie die behandelte Stelle 5 Minuten in lauwarmes Wasser eintauchen und die Hornhaut vorsichtig abfeilen. Wenn die Haut keine schwarzen Punkte (kleine Blutgefäße, typisch für Warzen) aufweist, wurde die Warze entfernt.

Die Hornhaut ist keine Warze. Es kann einige Wochen dauern, bevor die Hornhaut verschwindet und das optimale Ergebnis sichtbar wird. Die neue Haut wird weicher erscheinen, hellrosa aussehen und innerhalb einiger Wochen wieder eine normale Farbe annehmen.

WAS IST EINE WARZE?

Gewöhnliche Warzen (Verruca vulgaris) und Fußwarzen (Verruca plantaris) erscheinen auf der Haut als kleine, raue „blumenkohlähnliche“ Wucherungen, die durch humane Papillomaviren (HPV) verursacht werden. Gewöhnliche Warzen treten meistens auf Händen, Fingern oder Zehen auf. Fußwarzen bzw. Dornwarzen kommen meistens auf der Fußsohle oder der Ferse vor und sind oft etwas flacher, härter und schmerzhaft beim Stehen oder Laufen. Beide Warzentypen sind sehr ansteckend, deshalb sind etwa 7 bis 10% der Gesamtbevölkerung mindestens einmal im Leben davon betroffen.

WIE WIRKT EXCILOR® 2IN1 GEGEN WARZEN?

Excilor® 2in1 gegen Warzen ist ein Medizinprodukt für die schnelle und wirksame Behandlung von gewöhnlichen Warzen und Dornwarzen. Excilor® 2in1 gegen Warzen besteht aus einem Kombinations-Applikator, der zum einen ein Vereisungsmittel enthält und zum anderen ein hochkonzentriertes Gel auf Basis von Trichloressigsäure (TCA-Active™). Bei der Anwendung wird erst die Warze bis zu Wurzel vereist und im Anschluss die infizierte Haut entfernt. Die Kombination dieser beiden meistverwendeten Behandlungsmethoden in einem Produkt sorgt für ein schnelles Ergebnis. Sowohl die verdickte Warzenhaut als auch der Virus werden entfernt und es erscheint neue, gesunde Haut.

ANWENDUNG MIT ANDEREN BEHANDLUNGEN UND/ODER ARZNEIMITTELN

Nicht in Kombination mit anderen Warzenbehandlungen anwenden. Es sind keine Wechselwirkungen mit Arzneimitteln bekannt, sofern die Gebrauchsanweisungen befolgt werden.

WER KANN EXCILOR® 2IN1 GEGEN WARZEN VERWENDEN?

Excilor® 2in1 gegen Warzen kann von Erwachsenen und Kindern ab 4 Jahren verwendet werden. Die Anwendung bei Kindern darf nur von Erwachsenen vorgenommen werden. Während Schwangerschaft und Stillzeit sowie bei Diabetes, Kreislauf- oder Hautproblemen sollte vor der Anwendung ein Arzt befragt werden.

WAS SIND MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN?

Anwendung auf der gesunden Haut kann ein stechendes, leicht brennendes oder schmerzhaftes Gefühl auslösen. Bei anhaltenden Beschwerden sollte die Behandlung abgebrochen werden.

- Komplikationen sind selten. Die Bildung dauerhafter Flecken oder Narben ist sehr selten. Dies kann auf Heilungsstörungen oder Infektionen beruhen. Nehmen Sie in diesem Fall bitte Kontakt mit Ihrem Arzt auf.
- Wie bei allen Vereisungsbehandlungen kann die Haut an der behandelten Stelle vorübergehend weiß werden.
- Während der Vereisung kann ein juckendes, stechendes, schmerzhaftes Gefühl auftreten, das aber nach kurzer Zeit wieder verschwindet.
- Wird die Haut dem Vereisungsmittel zu lange ausgesetzt, können die oberen Hautschichten geschädigt werden, was zu Narben und/oder Nervenschäden führen kann.

WAS SIND DIE INHALTSSTOFFE?

Cryo-Active™ Vereisungsmittel, TCA-Active™ (auf der Basis von Trichloressigsäure), Carbopol, Aqua.

AUFBEWAHRUNG

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

In der Originalpackung bei Zimmertemperatur (15 bis 25 °C) und vor Sonnenlicht geschützt lagern.

Von offenem Feuer, Zündquellen, Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung und elektrostatischen und elektrischen Quellen fernhalten. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.

Nach jeder Verwendung die Spitze des Gel-Applikators sorgfältig mit einem Papiertaschentuch reinigen und den Applikator gut verschließen.

Nach dem Öffnen ist das Produkt noch 6 Monate haltbar.

DIESE PACKUNG ENTHÄLT

- Einen Kombinations-Applikator bestehend aus:
 - Behälter mit 11,5ml Vereisungsflüssigkeit und Stifthalter
 - Gel-Applikator mit 1ml TCA-Active™
- Beutel mit 5 Vereisungsstiften aus Schaumstoff
- Gebrauchsanweisung

WIE VERWENDEN SIE EXCILOR® 2IN1 GEGEN WARZEN?

Siehe Rückseite der Gebrauchsanweisung

WIE VERWENDEN SIE EXCILOR® 2IN1 GEGEN WARZEN?

Tag 1: Vereisungsmittel anwenden ❄️. Erwachsene und Kinder: **nur einmal**.
Tag 2, 3, 4, 5: Gel auftragen 🧴. Erwachsene: 2x täglich; Kinder von 4 bis 12 Jahren: 1x täglich.

Wenn Sie **EXCILOR® 2IN1 GEGEN WARZEN** zum ersten Mal verwenden, **behandeln Sie zuerst nur eine Warze**, um die Wirkung auf der Haut zu prüfen. Wenn Sie keine Nebenwirkungen feststellen (i.d.R. innerhalb von 5 Tagen), können Sie weitere Warzen behandeln. Wenn sich mehrere Warzen dicht nebeneinander befinden (innerhalb von 1 cm), warten Sie, bis sich die Haut regeneriert hat, bevor Sie andere Warzen behandeln (dies kann bis zu 6 Wochen dauern).

Wenn die Warze nicht ganz verschwindet, kann die **Behandlung bis zu dreimal wiederholt werden**. Wiederholen Sie die vollständige Behandlung erst nach 4 bis 7 Tagen. Lesen Sie den Abschnitt **WAS IST BEI DER BEHANDLUNG ZU ERWARTEN?**, damit Sie besser überprüfen können, ob die Warze ganz verschwunden ist oder nicht.

Hinweis: Wenn die behandelte Warze mit Hornhaut bedeckt ist, empfiehlt es sich, vor der Behandlung die Hand oder den Fuß zuerst 5 Minuten in lauwarmes Wasser zu legen und die Hornhaut zu entfernen.

Tag 1 - VEREISUNG | Produkt 1

VORBEREITUNG:





1. Lesen Sie die gesamte Gebrauchsanweisung oder schauen Sie sich das Video an. Entfernen Sie den Sicherheitsaufkleber.



Video-Anweisung



2. Öffnen Sie das Produkt 1. Drehen Sie dafür die schwarze Halterung von → .

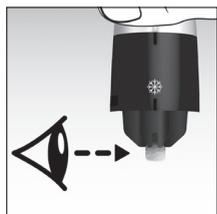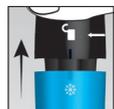


3. Überprüfen Sie, ob der Vereisungsstift in der Halterung steckt.
HINWEIS: Bei der nächsten Anwendung einen neuen Vereisungsstift in die schwarze Halterung stecken. Benutzte Vereisungsstifte nicht wiederverwenden.

ANWENDUNG:

HINWEIS: Lesen Sie zuerst die Schritte 4 bis 8! Verwenden Sie eine Stoppuhr.



4. Platzieren Sie Produkt 1 während der gesamten Behandlung aufrecht und stabil auf einem Tisch.

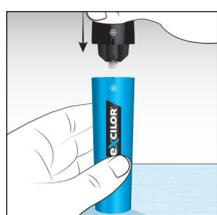

5. **Richten** Sie die Symbole ❄️ zueinander aus. Die schwarze Halterung weder drehen noch herunterdrücken.



6. **1 Sekunde lang KRÄFTIG DRÜCKEN.** Danach schwarze Halterung vom blauen Behälter ziehen.
HINWEIS: Wenn Sie zu lange gedrückt haben, kann kalte Flüssigkeit aus dem Applikator entweichen. Waschen Sie diese sofort ab, falls sie mit gesunder Haut in Kontakt kommt.

1 sek.



7. **WARTEN SIE 20 Sekunden**, bis eine optimale Temperatur erreicht ist. Dabei bilden sich auf dem Vereisungsstift ein Eisüberzug und ungefährliches Kondenswasser.


20 sek.



8. **DRÜCKEN SIE** den Vereisungsstift **20 Sekunden** lang leicht auf die Warze.
HINWEIS: 40 Sekunden auf Fußwarzen bzw. Dornwarzen oder Hornhaut.

20 sek.

NACH DER ANWENDUNG:

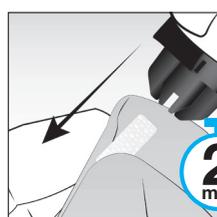

9. Warten Sie **2 Minuten**, bevor Sie mit einem Papiertaschentuch den Vereisungsstift entfernen und wegwerfen.

2 min

HINWEIS: Um eine andere Warze zu behandeln, die Schritte 3 bis 8 wiederholen.




10. Applikator wieder **zudrehen**, → bis Sie ein Klicken hören. **Nicht drücken.**





Tag 2, 3, 4, 5 - GEL | Produkt 2

VORBEREITUNG:

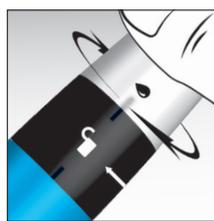

1. Öffnen Sie Produkt 2. **Drehen Sie den weißen Gel-Applikator** nach links bis über liegt. Dann Kappe nach oben ziehen.

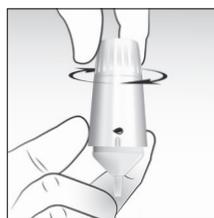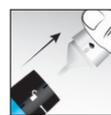


2. - Halten Sie den Gel-Applikator **mit der Spitze nach unten**.
 - Drehen Sie das geriffelte Ende des Gel-Applikators im Uhrzeigersinn.
 - Drehen Sie bis zum «Klick», um Gel aus der Spitze abzugeben.
 - Wischen Sie die Spitze ab und lassen Sie es einmal klicken für eine genaue Dosis.

HINWEIS: Bei der ersten Anwendung können bis zu 8 volle Umdrehungen notwendig sein, um das Gel bis in die Spitze zu befördern.

ANWENDUNG:


HINWEIS: Zuerst Schritte 3 bis 8 lesen! Verwenden Sie eine Stoppuhr.

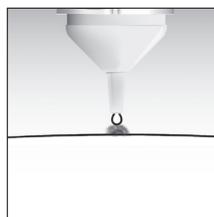

3. Tragen Sie **einen Tropfen Gel (= ein Klick) genau** auf die Warze auf. Wenn ein Tropfen nicht ausreicht, um die vollständige Warze zu bedecken, tragen Sie noch einen Geltropfen auf.




Wenn das ätzende Gel versehentlich mit gesunder Haut in Kontakt kommt, reinigen Sie den gesamten Bereich sofort mit Seife und Wasser, um eine Reizung oder Brennen auf der gesunden Haut zu vermeiden.

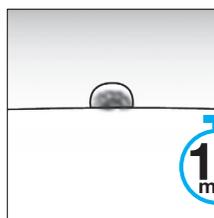


4. Warten Sie **10 bis 15 Minuten**, bevor Sie Socken, Schuhe oder Handschuhe anziehen.

10 min. ~ 15 min.


NACH DER BEHANDLUNG:

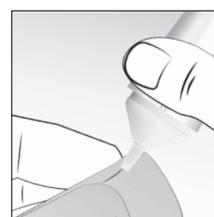

5. Spitze mit Papiertaschentuch reinigen.

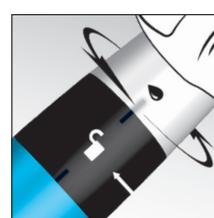

6. Applikator wieder zudrehen von → .

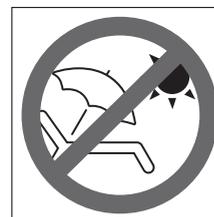

7. Sonnenlicht auf behandelter Haut 4 bis 6 Wochen vermeiden



8. Behandlung **zweimal täglich 4 Tage** lang wiederholen.

HINWEIS: Für Kinder von 4 und 12 Jahren: Gel nur **einmal täglich** auftragen.

HERSTELLER
 Medical Brands
 Innovations B.V.,
 Piet Heinkade 199,
 1019 HC Amsterdam,
 Niederlande.

VERTRIEB
 Kyberg Medical GmbH
 Kettenring 8
 82041 Oberhaching



tcaactive™ cryoactive™

Die Gebrauchsanweisung wurde zuletzt im Juni 2020 überarbeitet.
 100CAVE.DE.I.00

CE 2797